

**ottobock.**

***Myo Plus und  
Cockpit App.***  
Beste Verbindung.

”

*Die App ist für  
mich zeitsparend und  
verlässlich.*

*Ralph*



# Unkompliziert, schnell und ortsunabhängig.

Als Träger eines C-Leg, Genium, Genium X3 oder einer bebionic Hand bzw. Myo Hand in Verbindung mit einer Myo Plus Steuerung, kann Sie Ihr Orthopädietechniker über die angebotenen Apps auch aus der Ferne unterstützen. Die *Cockpit App* und *Myo Plus App* dienen dabei als Steuerungszentrale Ihrer Prothese.

Sie haben die Möglichkeit über die beiden Apps ganz einfach wichtige Daten zur Nutzung und zum Status mit Ihrem Orthopädietechniker zu teilen. So kann er den Zustand Ihrer Prothese bewerten, ohne dass Sie dafür ins Sanitätshaus kommen müssen! Auf Basis der Daten kann er einschätzen, ob ein persönlicher Termin vor Ort notwendig ist. Das spart Zeit und stellt sicher, dass Sie sich auf Ihre Prothese verlassen können.







## So nutzen Sie die Vorteile

- 1 Falls Sie die eine der beiden Apps noch nicht verwenden, laden Sie sich diese auf Ihr Smartphone herunter und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Prothese her.
- 2 Nutzen Sie die App bereits, stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version verwenden. Prüfen Sie ggf. ob ein Update vorliegt, welches Sie dann einfach über den Google Play Store oder den Apple App Store herunterladen können.
- 3 Erstellen Sie in der jeweiligen App ein MyOttobock Konto. Im Zuge der Anmeldung schicken wir Ihnen per Mail einen Bestätigungslink. Klicken Sie auf diesen Link. Überprüfen Sie zusätzlich auch Ihren Spam-Ordner.
- 4 Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Orthopädietechniker auf und senden ihm die E-Mail-Adresse Ihres MyOttobock Kontos, um eine persönliche Einladung zu erhalten.
- 5 Alternativ nutzen Sie den öffentlichen Einladungslink, welcher von Ihrem Sanitätshaus herausgegeben wird und verbinden Sie sich direkt ohne individuelle Einladung.
- 6 Die Apps übermitteln nun bei jedem Start im Hintergrund die wichtigsten Nutzungs- und Betriebsdaten Ihrer Prothese an Ihren Orthopädietechniker. Dieser kann die Daten Ihrer Prothese auswerten und Sie somit optimal aus der Ferne unterstützen.



### Hinweis

Bei detaillierten Fragen steht Ihnen Ihr Orthopädietechniker gern zur Verfügung.



### Voraussetzungen

- **Cockpit App:** Sie tragen ein C-Leg, Genium oder Genium X3
- **Myo Plus App:** Sie nutzen eine bebionic Hand oder Myo Hand in Verbindung mit der Myo Plus Steuerung
- Sie besitzen ein Android oder Apple Smartphone
- Sie haben eine E-Mail-Adresse zur Anlage eines MyOttobock Kontos



*Schnell connecten und Unterstützung erhalten.*

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH  
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414  
prothetik@ottobock.de · www.ottobock.com

© Ottobock · 646H44=de\_DE-02-2308 · Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.